



תנאי משלוח בדיקות מעבדה חיצוניות

שם בדיקה	סוג מבחנה	דרישות מיוחדות בהעברה למעבדה	כמות הדגימה (מינימום)*
CBC ספירת דם	EDTA (פקק סגול)		1.5 מ"ל
משטח דם בלבד	משטח לא צבוע או דם ב- EDTA		
בדיקה לקביעת סוג דם	EDTA (פקק סגול)		0.5 מ"ל
סלייד אגלוטינציה	EDTA (פקק סגול)		0.3 מ"ל
התאמת דם	EDTA (פקק סגול)		2 מ"ל
ספירת אוטומטית לרטיקוציטים או משטח ניו מתילן בלו	EDTA (פקק סגול)		0.5 מ"ל
שבירות אוטומטית של אריתרוציטים	EDTA (פקק סגול)	בדיקה איכותית בלבד	1.5 מ"ל
ביוכימיה:			
ביוכימיה פאנל מלא / חלקי/מדד בודד	סרום (פקק אדום / צהוב)	רצוי בקירור 4 מ"צ	2.5 מ"ל
ליפאז	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
לקטאט	פלוואריד (פקק אפור)		1 מ"ל
חומצות מרה vetscan	סרום (פקק אדום) או הפרין	(כולל פאנל כבד חלקי)	1.5 מ"ל
BHBA	סרום (פקק אדום)		1 מ"ל
פרוקטוזאמין	סרום (פקק אדום)		1 מ"ל
אמוניה	הפארין (פקק ירוק)	אפשרויות: 1. למלא מבחנה עד הגעה לואקום, לאטום, חייב להגיע תוך 30 ד' למעבדה, מקורר ואטום לאויר, יש לתאם הגעה עם המעבדה 2. להפריד הפלסמה לתוך מזרק, לרוקן היטב מאויר, לאטום ולשלוח בקירור	1.5 מ"ל
cPLI/fPLI	סרום (פקק אדום)	רצוי בקירור 4 מ"צ	1.5 מ"ל
כולינאטראז	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
טרופונין T	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
CSF protein	סרום (פקק אדום) (בלי ג'ל)	יש לתאם עם המעבדה הגעה וכן דרכי שימור הדגימה	0.5 מ"ל
גלוקומטר	EDTA (פקק סגול)	חייב להגיע תוך 15 ד' למעבדה	
אלקטרוליטים	סרום (פקק אדום)	(אפשר גם בהפרין, 0.5 מ"ל)	1 מ"ל
גזים בדם	מזרק שטוף בהפארין	מזרק אטום לאויר, בקירור (4 מ"צ), חייב להגיע תוך 4 ש' מהדיגום	0.5 מ"ל
הורמונים:			
קורטיזול	סרום (פקק אדום)		2 מ"ל
T4	סרום (פקק אדום)		2 מ"ל
תפקודי קרישה:			
**PT/PTT	ציטראט (פקק תכלת)	חשוב לסרכז ולהפריד פלסמה תוך 30 ד' מהאיסוף ולשלוח בקירור (4 מ"צ)	לפי הסימון במבחנה
פאנל קרישה**	ציטראט (פקק תכלת)	חשוב לסרכז ולהפריד פלסמה תוך 30 ד' מהאיסוף ולשלוח בקירור (4 מ"צ)	
אנטיטרוברין**	ציטראט (פקק תכלת)	רצוי לסרכז ולהפריד הפלסמה	
די דימר**	ציטראט (פקק תכלת)	רצוי לסרכז ולהעביר פלסמה	
זמן דימום (Buccal mucosal bleeding time)		מחיר ללהב חד פעמי, הוראות שיוש באתר בית החולים / טלפונית	
פיברינוגן**	ציטראט (פקק תכלת)	חשוב לסרכז ולהפריד פלסמה תוך 30 ד'	



בית החולים הווטרינרי Veterinary Teaching Hospital

ת.ד. 12 רחובות, 76100. טל: 03-9688588, פקס: 03-9688525
P.O Box 12 Rehovot 76100. Tel: +972-(0)3-9688588, Fax: +972(0)3-9604079

תכלת)	ד' מהאיסוף ושלוח בקירור (4 מ"צ)		
סרולוגיה:			
FIV/FeLV	סרום (פקק אדום)	אפשר ב - EDTA או הפארין (1 מ"ל)	1.5 מ"ל
סרולוגיה קיט ארליכיה IgG	סרום (פקק אדום)	אפשר ב - EDTA או הפארין	1 מ"ל
סרולוגיה FIP קיט - coronavirus	סרום (פקק אדום)		1 מ"ל
אנטיגן בצואה-giarda	צואה בכלי מתאים וסגור		כפית
סרולוגיה ליישמניה	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל
כלמידיה/טוקסו/נאו/לפטו/ברוצלה	סרום (פקק אדום)		1.5 מ"ל

ציטולוגיה/היסטולוגיה:			
ציטולוגיה	סליידים בכלי אחסון מתאים	עדיף לא צבוע	
נוזלי גוף (SG, TS, PCV) + (ציטולוגיה)		רצוי בקירור 4 מ"צ	5 מ"ל
ציטולוגיה CSF	EDTA (פקק סגול)	יש לתאם עם המעבדה הגעה וכן דרכי שימור הדגימה (לשים לב שחלבון נשלח במבחנה שונה)	
ציטולוגיה של מח עצם לא כולל שאיבה	משטחים לא צבועים	דגימת מח העצם נלקחת למזרק עם EDTA ורצוי להעביר מיד למשטחים	
מגרד עור צבוע	משטח לא צבוע		
משטח אוזן צבוע (עד 4 משטחים)	משטח לא צבוע		
ציטולוגיה בציטוספין	EDTA (פקק סגול)	דגימות נוזלי גוף / BAL / שתן (איכות ציטולוגית משופרת הצורת התאים טוב יותר לאחר סרכוז ובזמן מריחת החומר על המשטח)	
שתן / צואה:			
בדיקת שתן	מבחנת שתן	רצוי בקירור 4 מ"צ	5 מ"ל לפחות
יחס חלבון לקריאטינין בשתן	מבחנת שתן		1 מ"ל
מבחן אמוניום סולפאט למיוגלובין בשתן	מבחנת שתן		6 מ"ל
חלבוני BJ בשתן	מבחנת שתן	בדיקה איכותית בלבד	5 מ"ל
משטח ציטולוגי ב - cytopspin + ציטולוגיה	EDTA (פקק סגול)		5 מ"ל
דם סמוי בצואה	צואה בכלי מתאים וסגור		טיפה

* כמות הדם הדרושה בדגימה הינה כמות מינימאלית לביצוע הדגימה המבוקשת בלבד.
במידה ודרושות מס' בדיקות מאותה המבחנה (למשל - CBC, שירות אוסמוטית ואגלוטינציה), יש להוסיף הכמות הדרושה לכל בדיקה למבחנה.
** בכל תפקודי הקרישה - חשוב לוודא שאין במבחנה קרישי דם!